


# Wie machst du den Nasen-Test?

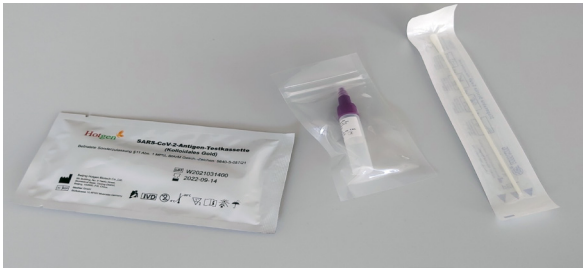

Du brauchst:

eine Kassette (Packung)

eine kleine Flasche

ein kleiner Stab



1: Nimm die Kassette aus der Packung.



2: Nimm den Stab aus der Packung.



3: Stecke den Stab in die Nase. Drehe 4 bis 6 Mal und kratze vorsichtig.



4: Mache das Gleiche auf der anderen Seite. Es reichen 1,5 cm oder eine Fingerspitze tief.



5: Mache die Flasche auf und stecke den Stab in die Flasche. Zähle bis 15, drehe dabei den Stab und drücke die Flasche 3 Mal.




6: Nimm den Stab aus der Flasche, stecke den Stab in einen kleinen Beutel und wirf ihn in den Mülleimer.



7: Mache den lila Deckel auf die Flasche.



8: Mache 4 Tropfen in das Loch auf der Kassette. Da steht S.

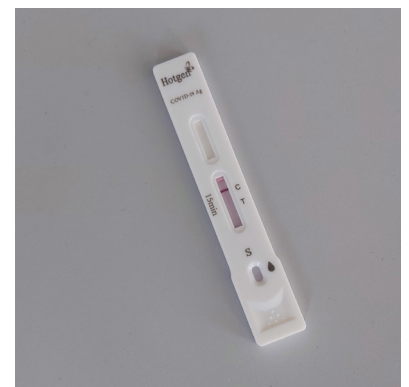

9: Warte 15 Minuten. Strich bei C = negativ, zwei Striche bei C und T = positiv.